



# MASQUE CHIRURGICAL

## 3 plis - Haute protection

### DOMAINE D'UTILISATION

Milieu hospitalier en général, centre de soins.

### DESCRIPTIF PRODUIT

- Masque de type II selon la norme EN 14683-2005 relative aux masques chirurgicaux.
- Masque à haute filtration couvre la bouche, le nez et le menton.
- Porté par la personne contagieuse, il prévient la contamination de l'entourage et de l'environnement.
- Porté par le soignant, le masque prévient la contamination du patient et de son environnement (air, surface, produits, ...).
- Protège contre les agents infectieux transmissibles par voie « gouttelettes ».
- Durée d'utilisation : 4 heures.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matière : ..... - complexe très haute filtration non tissé 3 plis, dont 1 filtre en microfibre.  
- face externe en spunbond polypropylène, bleu /vert et blanc.  
- face interne blanche hypoallergénique en thermobonded polypropylène.
- Filtre : ..... 100 % microfibres de polypropylène sans fibre de verre.
- Barette nasale : ..... antibuée incorporée.
- Liens : ..... polyester, fixations auriculaires.
- Agent liant : ..... d'origine acrylique.
- Dimensions : ..... longueur à plat : 164 mm.  
largeur à plat : 116 mm.
- Tolérance : ..... +/- 2 %.
- Poids : ..... 5.1g.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Changer le masque s'il est mouillé. Bien ajuster le masque : dépliage complet du masque, liens bien serrés. Procéder à une hygiène des mains après avoir mis le masque et après l'avoir enlevé. Ne pas réutiliser, ne pas le conserver autour du cou. Éliminer le masque après utilisation. Un masque doit être porté ou jeté.

### INFORMATION DE STOCKAGE

Stocker dans son emballage à l'abri de la lumière et de l'humidité..

Produit fabriquée selon la norme EN14683

### LOGISTIQUE

Conditionnement : sac de 10 / Boite de 50 pièces

Carton : 100 sacs / 40 boites

CODE PRODUIT

